


Heari 助聽耳機簡易使用指引

型號：A1-X, A1-O

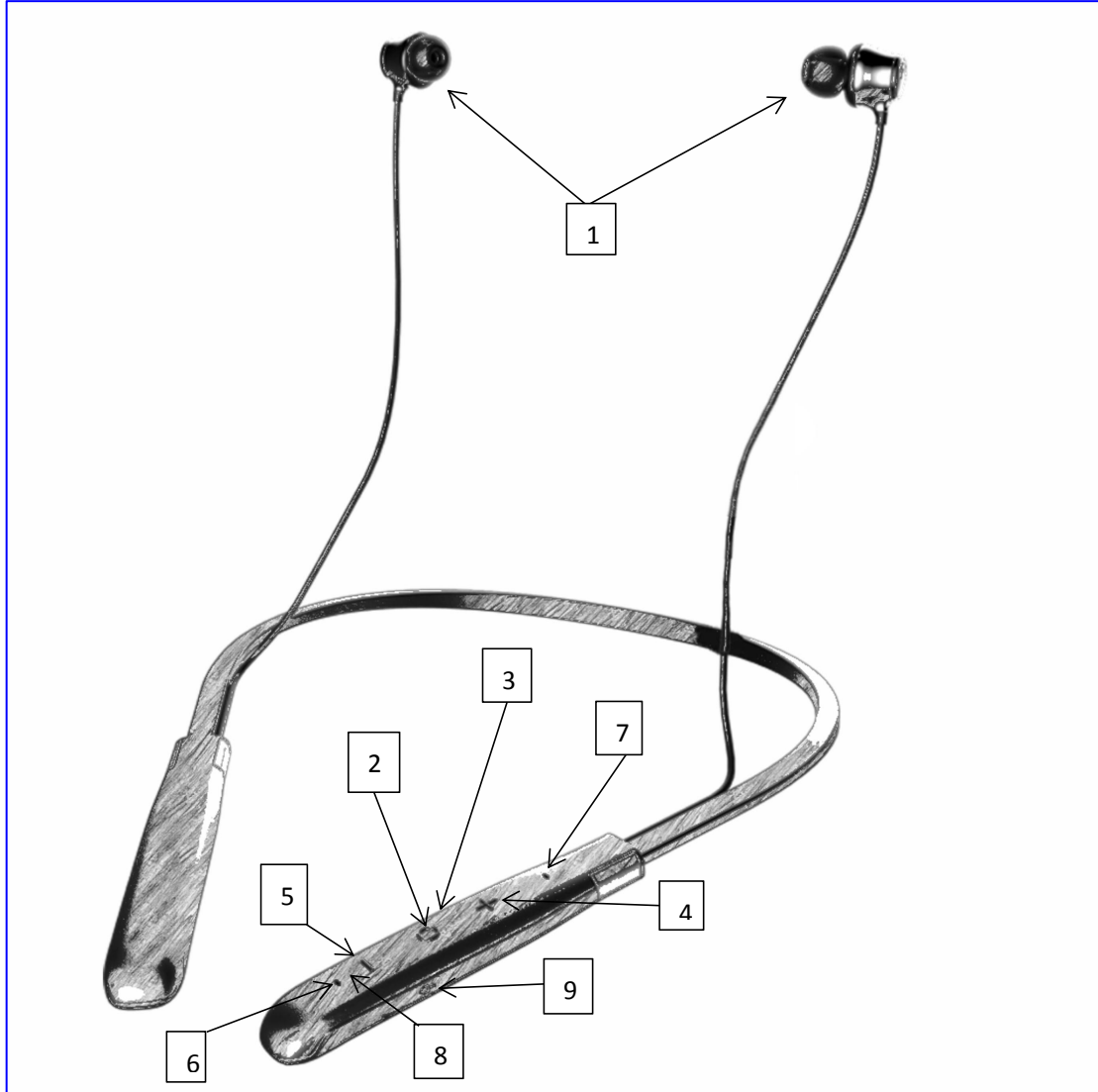

硬體概覽：

1. 耳機頭
2. 電源開關鍵
3. 模式轉換鍵 (側鍵)
4. 提高音量鍵
5. 降低音量鍵
6. 前置咪
7. 後置咪
8. 信號燈
9. USB 充電口

使用指引 ("耳朵頻譜"已上載入耳機):

1. 開啟耳機
 按住[電源開關鍵] 約 2-3 秒 , [信號燈] 亮起來。
2. 使用助聽功能
 按住[模式轉換鍵] 約 2-3 秒 。
3. 調節音量大小
 按住[提高音量鍵] 或 [降低音量鍵] 來調節音量大或小。當音量調節至最大或小時, 會有"嗶"聲作提示。
4. 關閉耳機
 按住[電源開關鍵] 約 2-3 秒 , 直到 [信號燈] 熄滅。
5. 耳機充電
 - . 當按住[電源開關鍵] 未能開啟耳機, 或使用期間沒有了功能。就需要為耳機充電。
 - . 將 USB 連接線的一頭插入充電器或插入電腦的 USB 連接埠 , 再將連接線另一頭插入耳機的[USB 充電口]。
 - . 充電時 [信號燈] 會亮紅色, 充電完成後會變藍色。
 - . 耳機充電需約 2.5 小時。

備註 :

- . 當耳機未能正常操作, 請進行充電程序, 然後再重啟耳機。
- . 詳細資料請參閱以下網址: www.heariaudio.com